

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Stojak na kroplówki z kółkami, 4 zaczepy

Kod produktu: TGR-R SK-4H



1. Wykonanie

Stojak na kroplówki wykonany jest z aluminium, posiada cztery zaczepy oraz plastikową podstawę z pięcioma kółkami i hamulcami. Dzięki prostej regulacji wysokości, posiada możliwość indywidualnego dostosowania do potrzeb użytkownika.


2. Zastosowanie

Stojak jest sprzętem pomocniczym ułatwiającym podanie płynów infuzyjnych. Przeznaczony do stosowania w warunkach domowych i szpitalnych.

3. Montaż

Krok 1. Plastikowy łącznik (3) należy włożyć do otworu montażowego znajdującego się na środku podstawy (4).

Krok 2. Trzon stojaka (2) należy włożyć do plastikowego łącznika (3) umieszczonego wcześniej w podstawie (4).

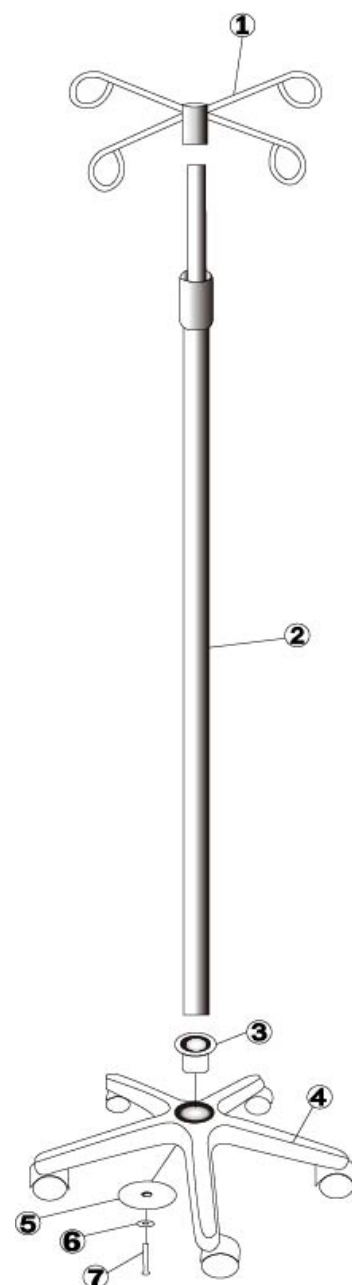

Krok 3. Od dołu podstawy (4) należy zamocować podkładki zabezpieczające (5,6) oraz wkręcić śrubę (7).

Krok 4. Uchwyt na kroplówki (1) należy przykręcić w górnej części trzonu (2).

4. Specyfikacja techniczna

Regulacja wysokości	104 -211 cm
Waga stojaka	2,56 kg
Maks. obciążenie jednego zaczepu	2,5 kg
Średnica podstawy	56 cm
Wysokość podstawy	13 cm
Koła	5 kół o śr. 2''

5. Uwagi i zalecenia

Timago International Group nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe korzystanie z wyrobu, nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz za korzystanie niezgodne z przeznaczeniem.

6. Konserwacja

- Stojak należy czyścić używając wody, gąbki i łagodnych środków czyszczących do tworzyw sztucznych np. mydła lub delikatnych detergentów posiadających atest PZH, po każdym użyciu wycierać do sucha.

- Nie należy używać do czyszczenia: silnych detergentów, środków ściernych, wybielaczy, benzyny ani żadnych rozpuszczalników (grozi uszkodzeniem ramy, widocznymi ubytkami, a w konsekwencji - utratą praw gwarancyjnych).
- Należy systematycznie sprawdzać:
 - dokręcenie śrub
 - stan sztyftów
 - stan rurek (pod kątem pęknięć)
 - stan kółek

7. Dane dotyczące gwarancji

Wszystkie produkty dystrybuowane przez naszą firmę objęte są gwarancją, której warunki zostały opisane w karcie gwarancyjnej, jaką otrzymali Państwo w momencie zakupu. Chcielibyśmy jednocześnie zwrócić uwagę, że do celów gwarancyjnych należy zachować dowód zakupu (paragon lub fakturę).

8. Oznaczenia

	Numer referencyjny		Producent
	Numer serii		Data produkcji
	Numer seryjny		Wyrób medyczny
	Uwaga		Zapoznaj się z instrukcją



Producent dokonał oceny zgodności z
wymogami zasadniczymi dotyczącymi wyrobów
medycznych.

Całość oferty dostępna jest dla Państwa u naszych
dystrybutorów. Dowiedz się więcej na www.timago.com
Dziękujemy za wybór Timago!



Timago International Group
Spółka z o.o. i Spółka – Spółka komandytowa
ul. Karpacka 24/12
43-316 Bielsko-Biała, Polska

T.: +48 33 499 50 00
F.: +48 33 499 50 11
E.: info@timago.com



Wydanie II, data aktualizacji 29.03.2021