



Użytkownicy powinni sprawdzić co najmniej raz w tygodniu, czy zagłówek Superhead jest sprawny pod kątem następujących obszarów:

- tapicerka powinna być czyszczona przez wycieranie nawilżoną delikatnym detergentem ściereczką. *(Nie używać wybielacza).*
- Składanie powinno być swobodne i nie powinno się pojawić żadne zakłócenie podczas składania wózka inwalidzkiego.
- W niektórych przypadkach (w celu złożenia i przechowania osobno) będzie koniecznym demontaż części z poduszką wspierającą poprzez zwolnienie gałki. *(Wszystkie śruby i mocowania powinny zostać zabezpieczone.)*

Zagłówek Superhead może być zamontowany to każdego wózka składanego w płaszczyźnie bocznej, posiadającego tylne ręczki do pchania zrobione z rurek od 22 mm.

Są dostępne w trzech rozmiarach:

Duże (L): dla wózków inwalidzkich z szerokością siedzenia od 42 cm do 54 cm

Średnie (M): dla wózków inwalidzkich z szerokością siedzenia od 36 cm do 46 cm

Małe (S): dla wózków inwalidzkich z szerokością siedzenia od 30 cm do 36 cm


Zagłówek Superhead służy jako wygodne wsparcie głowy użytkowników wózków inwalidzkich: dzieci oraz osób dorosłych.

INSTRUKCJA

Ten zagłówek jest zaprojektowany do użycia jedynie w sposób opisany na niniejszej ulotce. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek odniesione urazy lub uszkodzenia wózka związane z modyfikacjami tego zagłówka.

W celu uniknięcia urazów lub potencjalnych uszkodzeń wózka inwalidzkiego, należy się dokładnie zapoznać z instrukcją montażu zagłówka przed jego instalacją.



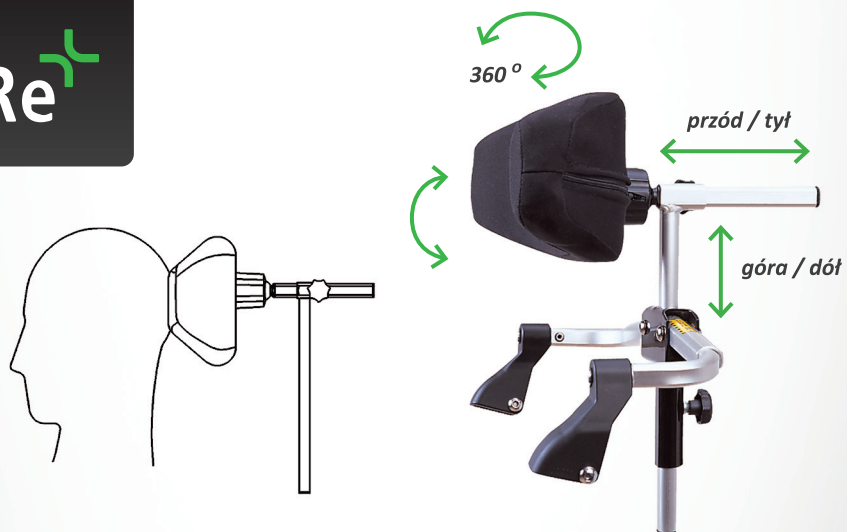


Pozycja pozioma zagłówek powinna być ustawiona nie dalej niż 10 mm od głowy.
 Wysokość zagłówek powinna być ustawiona na wysokości środka głowy użytkownika.
 Wysokość zagłówek można regulować za pomocą gałki, jak przedstawia diagram.
 Zwolnienie gałki pozwala na obniżenie lub podniesienie rurki z zamocowaną na niej poduszką.
 Po ustawieniu odpowiedniej wysokości, gałka powinna być ręcznie dociśnięta.
 Nie należy przekraczać wysokości.

ZAŁĄCZNIKI

- Instrukcja 1 szt.
- Śruba i nakrętka M5 2 kpl
- Kluczyk M5 (5m) 2 szt.
- Kluczyk M3 (3m) 1 szt.
- Gałka regulująca 2 szt.
- Uszczelka 1 szt.


RYSUNEK MONTAŻOWY

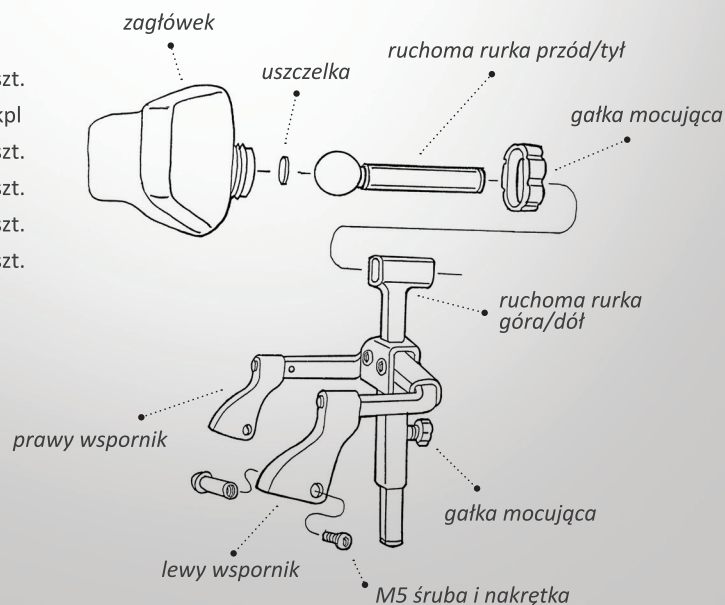

JAK INSTALOWAĆ:



Najpierw rozłóż wózek inwalidzki, poluzuj śruby (B) by pozwolić na swobodne przesuwanie się rurek. Zamontuj wsporniki (E) na zaokrąglonych częściach rączek wózka, następnie skręć śruby (A).

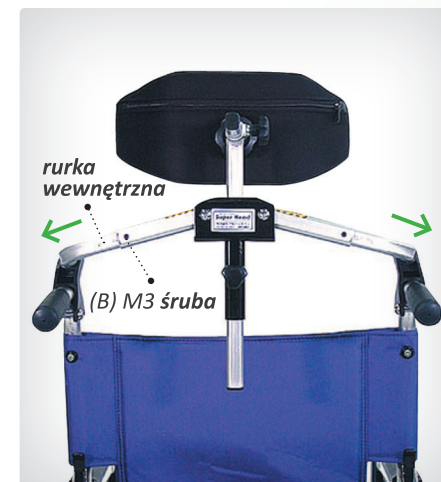

Z pomocą drugiej osoby delikatnie rozchyl tylne rączki wózka inwalidzkiego, jednocześnie ustaw środkowe łączenia najwyżej jak to możliwe (w celu uzyskania odpowiedniego napięcia się zagłówek), następnie skręć śruby (B).

JAK UŻYWAĆ:



Podczas używania wózka inwalidzkiego, rozłóż najpierw wózek, a następnie podeprzyj zagłówek.



Podczas składania wózka, najpierw złóż w dół zagłówek w celu rozluźnienia napięcia wzmacniającego, następnie złóż wózek.