

REF FS 793S



PL	ŁAWKA OBROTOWA NA WANNE
EN	ROTATING BATHTUB CHAIR
CZ	SEDAČKA DO VANY OTOČNÁ
SK	OTOČNÁ SEDAČKA DO VANE
PT	CADEIRA DE BANHO GIRATÓRIA
EE	PÖÖRLEV VANNIISTE
LV	VANNAS KRĒSLS, ROTĒJOŠS
LT	SUKIOJAMA VONIOS KĖDĖ
RO	SCAUN CADA ROTATIV
SI	SEDEŽ ZA KAD VRTLJIV
SE	BADKARSBÄNK – ROTERBAR
RU	ПОВОРОТНОЕ СИДЕНИЕ СО СПИНКОЙ ДЛЯ ВАННОЙ
HR	STOLICA ZA KADU S ROTIRAJUĆIM SJEDIŠTEM
BA	ROTIRAJUĆA TOALETNA STOLICA

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Ławka obrotowa na wannę

Kod produktu: FS 793S



1. Wykonanie


Ławka obrotowa na wannę posiada wyprofilowane siedzisko z oparciem zamontowane centralnie na obrotowej podstawie. Rama wyposażona jest w kliny rozporowe stabilizujące ławkę oraz dźwignię, dzięki której możliwe jest blokadowanie siedziska w żądanej pozycji. Konstrukcja ławki wykonana jest ze stali nierdzewnej i posiada na końcówkach nasadki antypoślizgowe które uniemożliwiają przesuwanie się ławki na wannie, a także zapewniają pacjentowi bezpieczeństwo oraz stabilność podczas kąpieli. Ławka dodatkowo wyposażona jest w uchwyty boczne dla pacjentów z trudnościami w samodzielnym wstawaniu i siadaniu. Siedzisko i oparcie ławki wykonane jest z PCV i zawiera otwory służące do odprowadzenia wody. Całość wykonana jest z materiałów o podwyższonej wytrzymałości na wilgoć.

Zestaw zawiera:

- Górną ramę z siedziskiem
- Dolną ramę z klinami rozporowymi
- Śrubę montażową

Części składowe:

- a) uchwyt boczny
- b) dźwignia regulująca
- c) śruba montażowa
- d) kliny rozporowe
- e) nasadki antypoślizgowe

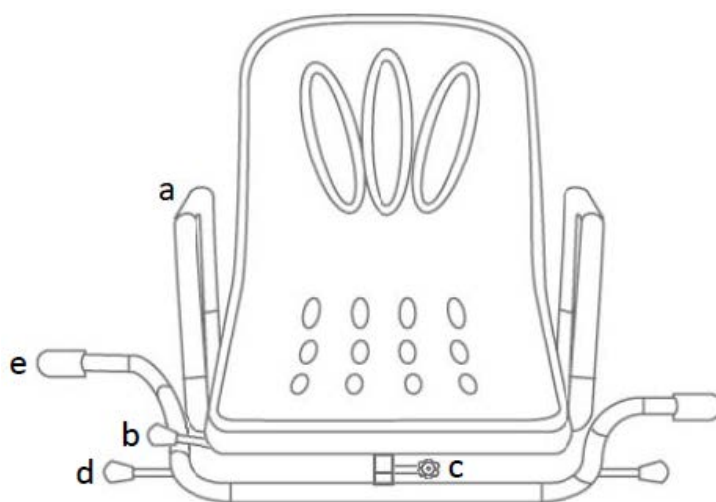

2. Zastosowanie

Ławka obrotowa na wannę jest sprzętem pomocniczym ułatwiającym użytkownikowi korzystanie z wanny podczas czynności higienicznych. Zalecana jest osobom o obniżonej sprawności ruchowej, która uniemożliwia bądź utrudnia samodzielne wykonywanie czynności życia codziennego. Obrotowe siedzisko można zablokować w żądanej pozycji, co zapewnia bezpieczniejszą i wygodniejszą kąpiel, a także wejście i wyjście z wanny.

3. Montaż

MONTAŻ ŁAWKI

Rama ławki powinna mieć szerokość odpowiadającą szerokości wanny, nasadki antypoślizgowe powinny mieć pełen kontakt z brzegiem wanny.

Krok 1. Dolną ramę należy umieścić na wannie.

Krok 2. Następnie należy wyregulować kliny rozporowe przy pomocy motylków, tak aby rama była stabilna i nie przesuwała się na brzegach wanny.

Krok 3. Należy odkręcić śrubę montażową, która znajduje się na ramie górnej pod siedziskiem i połączyć ramę górną z ramą dolną, nakładając ją na element montażowy. Na końcu należy dokręcić śrubę montażową.

Krok 4. Następnie należy pociągnąć do góry dźwignię regulującą, obrócić ramę górną w dogodnym kierunku, a następnie opuścić dźwignię regulującą w otworze montażowym dolnej ramy tak, aby zatrzasnął się sztyft zabezpieczający.

Krok 5. Należy sprawdzić, czy wszystkie elementy ławki zamontowane są poprawnie oraz czy rama ustawiona jest prawidłowo.

4. Specyfikacja techniczna

Szerokość całkowita	74 cm
Szerokość wewnętrzna	50 cm
Wymiar wgłębny	13 cm

Wymiary siedziska	40 x 32 cm
Waga ławki	5 kg
Maksymalne obciążenie	100 kg

5. Uwagi i zalecenia

Timago International Group nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe korzystanie z ławki, nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz za korzystanie niezgodne z przeznaczeniem.










6. Konserwacja

- Ławkę należy czyścić regularnie używając wody, gąbki i łagodnych środków czyszczących do tworzyw sztucznych np. mydła lub delikatnych detergentów posiadających atest PZH, po każdym użyciu wycierać do sucha.
- **Nie należy używać** do czyszczenia: silnych detergentów, środków ściernych, wybielaczy, benzyny ani żadnych rozpuszczalników (grozi uszkodzeniem ramy, widocznymi ubytkami, a w konsekwencji - utratą praw gwarancyjnych).
- Co najmniej raz na 3 miesiące należy sprawdzić stan:
 - śruby montażowej
 - klinów rozporowych
 - ramy i siedziska (pod kątem pęknięć)
 - nasadek antypoślizgowych

7. Dane dotyczące gwarancji

Wszystkie produkty dystrybuowane przez naszą firmę objęte są gwarancją, której warunki zostały opisane w karcie gwarancyjnej, jaką otrzymali Państwo w momencie zakupu. Chcielibyśmy jednocześnie zwrócić uwagę, że do celów gwarancyjnych należy zachować dowód zakupu (paragon lub fakturę).

8. Oznaczenia

	Numer referencyjny		Producent
	Numer serii		Data produkcji
	Numer seryjny		Wyrób medyczny
	Uwaga		Zapoznaj się z instrukcją
	Producent dokonał oceny zgodności z wymogami zasadniczymi dotyczącymi wyrobów medycznych.		

Całość oferty dostępna jest dla Państwa u naszych dystrybutorów.

Dowiedz się więcej na: www.timago.com

Dziękujemy za wybór Timago!



Timago International Group
Spółka z o.o. i Spółka – Spółka komandytowa
ul. Karpacka 24/12
43-316 Bielsko-Biała, Polska

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: info@timago.com



Wydanie II, data aktualizacji 29.03.2021



Timago International Group
Spółka z o.o. i Spółka – Spółka komandytowa
ul. Karpacka 24/12
43-316 Bielsko-Biała, Polska

T.: +48 33 499 50 00
F.: +48 33 499 50 11
E.: info@timago.com



Wydanie II, data aktualizacji 29.03.2021