

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Krzesło toaletowe stałe

Kod produktu: TGR-R KT-S 668




1. Wykonanie

Krzesło toaletowe wykonane jest ze stalowej, malowanej proszkowo ramy. Posiada regulowane na wysokość nóżki zakończone gumowymi nasadkami antypoślizgowymi. Krzesło wyposażone jest w deskę sedesową z klapą oraz łatwo wyciągany plastikowy pojemnik sanitarny z pokrywką. Krzesło wykonane jako stałe dzięki zastosowaniu śrub i motylków jest łatwe w samodzielnym montażu. Regulacja pozwala na dostosowanie do potrzeb pacjenta, a boczne podłokietniki wspomagają stabilność i bezpieczeństwo użytkowania.

Zestaw zawiera: barierki boczne z uchwytem i nasadkami antypoślizgowymi, ramę tylną wygiętą, ramę przednią i tylną z otworami wewnętrznymi, deskę sedesową i klapę, pojemnik sanitarny z pokrywką

Części składowe:

- a. barierka boczna z podłokietnikiem
- b. wygięta rama poprzeczna
- c. tylna rama
- d. przednia rama
- e. wiaderko sanitarne
- f. regulacja wysokości-sztyft blokujący
- g. nasadki antypoślizgowe

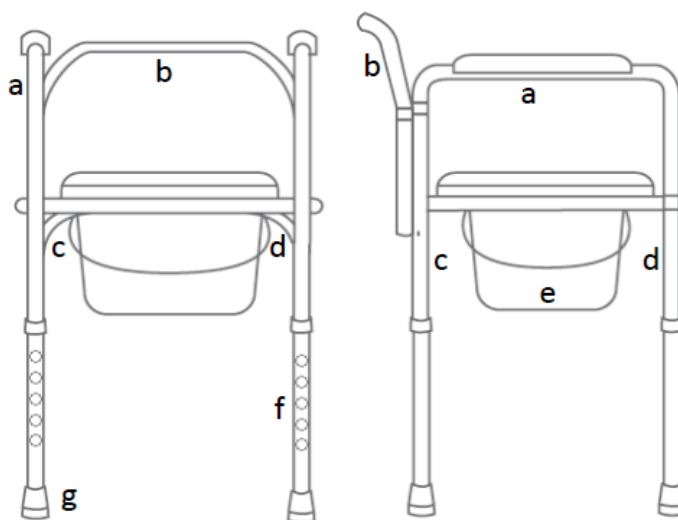

2. Zastosowanie

Krzesło toaletowe jest sprzętem pomocniczym ułatwiającym użytkownikowi wykonanie czynności higienicznych. Zalecane jest

dla osób, mających problemy z samodzielnym poruszaniem się, z dysfunkcjami i ograniczeniami ruchowymi oraz dla osób, które utraciły zdolność samodzielnego siadania i wstawania. Krzesło pełni funkcję toaletową dzięki wyposażeniu w pojemnik sanitarny pod siedziskiem. Ułatwia przeprowadzenie czynności fizjologicznych i pielęgnacyjnych użytkownika.

3. Montaż

Rozłożenie i złożenie krzesła toaletowego

Krok 1: bariery boczne z podłokietnikami należy zmontować z wygiętą ramą poprzeczną przy pomocy śrub motylkowych z dużymi podkładkami. **Krok 2:** tylną i przednią ramę krzesła należy przykręcić od wewnątrz do bocznych uchwytów czterema śrubami montażowymi. **Krok 3:** na dolnej barierce ramy tylnej należy zamontować deskę sedesową z klapą, aż zaskoczą plastikowe uchwyty. **Krok 4:** do stalowych uchwytów pojemnika należy zamontować wiaderko sanitarne lub osłonkę sanitarną w przypadku korzystania z krzesła jako podstawki nad sedes.

Regulacja wysokości: Aby wyregulować wysokość krzesła, należy wcisnąć metalowy sztyft, wybrać odpowiednią wysokość nóżki, a następnie zablokować położenie względem siebie sztyftem blokującym. Nóżki regulowane są skokowo co 2,5 cm. Sztyfty we wszystkich nóżkach muszą być ustawione na tym samym poziomie. Nóżki powinny zawsze stabilnie stać na podłożu.

Użytkowanie

Podnieść klapę sedesu, a następnie zdjąć pokrywę pojemnika. Po użyciu przykryć pojemnik pokrywą, a następnie opuścić klapę sedesu.

4. Specyfikacja techniczna

Szerokość całkowita	55 cm
Szerokość wewnętrzna	44 cm

Głębokość całkowita	47 cm
Wysokość siedziska od podłoża	43-58 cm
Wysokość całkowita od podłoża	64-79 cm
Wymiary siedziska	51 cm x 35 cm
Waga krzesła	6,6 kg
Maksymalne obciążenie	110 kg
Kolor ramy	szary

5. Uwagi i zalecenia

Timago International Group nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe korzystanie z krzesła toaletowego, nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz za korzystanie niezgodne z przeznaczeniem.

6. Konserwacja

Należy systematycznie dokonywać samodzielnej kontroli stanu technicznego krzesła:


- Krzesło toaletowe należy czyścić regularnie używając tylko wody i łagodnych detergentów mających atest PZH. Dokładnie osuszyć.
- **Nie należy używać** do czyszczenia: ostrych środków polerskich, silnych detergentów, środków ściernych, wybielaczy, benzyny ani żadnych rozpuszczalników (grozi uszkodzeniem ramy, widocznymi ubytkami, a w konsekwencji - utratą praw gwarancyjnych).
- Po każdorazowym użyciu należy opróżnić i zdezynfekować pojemnik sanitarny oraz deskę sedesową. Należy wykorzystywać środki do czyszczenia toalet zgodnie z zaleceniami ich producenta.

7. Dane dotyczące gwarancji

Wszystkie produkty dystrybuowane przez naszą firmę objęte są gwarancją, której warunki zostały opisane w karcie gwarancyjnej,

jaką otrzymali Państwo w momencie zakupu. Chcielibyśmy jednocześnie zwrócić uwagę, że do celów gwarancyjnych należy zachować dowód zakupu (paragon lub fakturę).

8. Oznaczenia

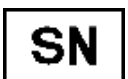	Numer referencyjny		Producent
	Numer serii		Data produkcji
	Numer seryjny		Wyrób medyczny
	Uwaga		Zapoznaj się z instrukcją
	Producent dokonał oceny zgodności z wymogami zasadniczymi dotyczącymi wyrobów medycznych.		

Całość oferty dostępna jest dla Państwa u naszych dystrybutorów.
Dowiedz się więcej na **www.timago.com**

Dziękujemy za wybór Timago!



Timago International Group
Spółka z o.o. i Spółka – Spółka komandytowa
ul. Karpacka 24/12
43-316 Bielsko-Biała, Polska
T.: +48 33 499 50 00, F.: +48 33 499 50 11
E.: info@timago.com



Wydanie II, data aktualizacji 29.03.2021