

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Montaż zagłówka do wózka inwalidzkiego

Timago



1. Elementy zagłówka

Rys. 1


A. Zacisk (2 szt.)

B. Podkładka (2 szt.)

C. Uchwyt (2 szt.)

D. Rama

E. Zagłówek

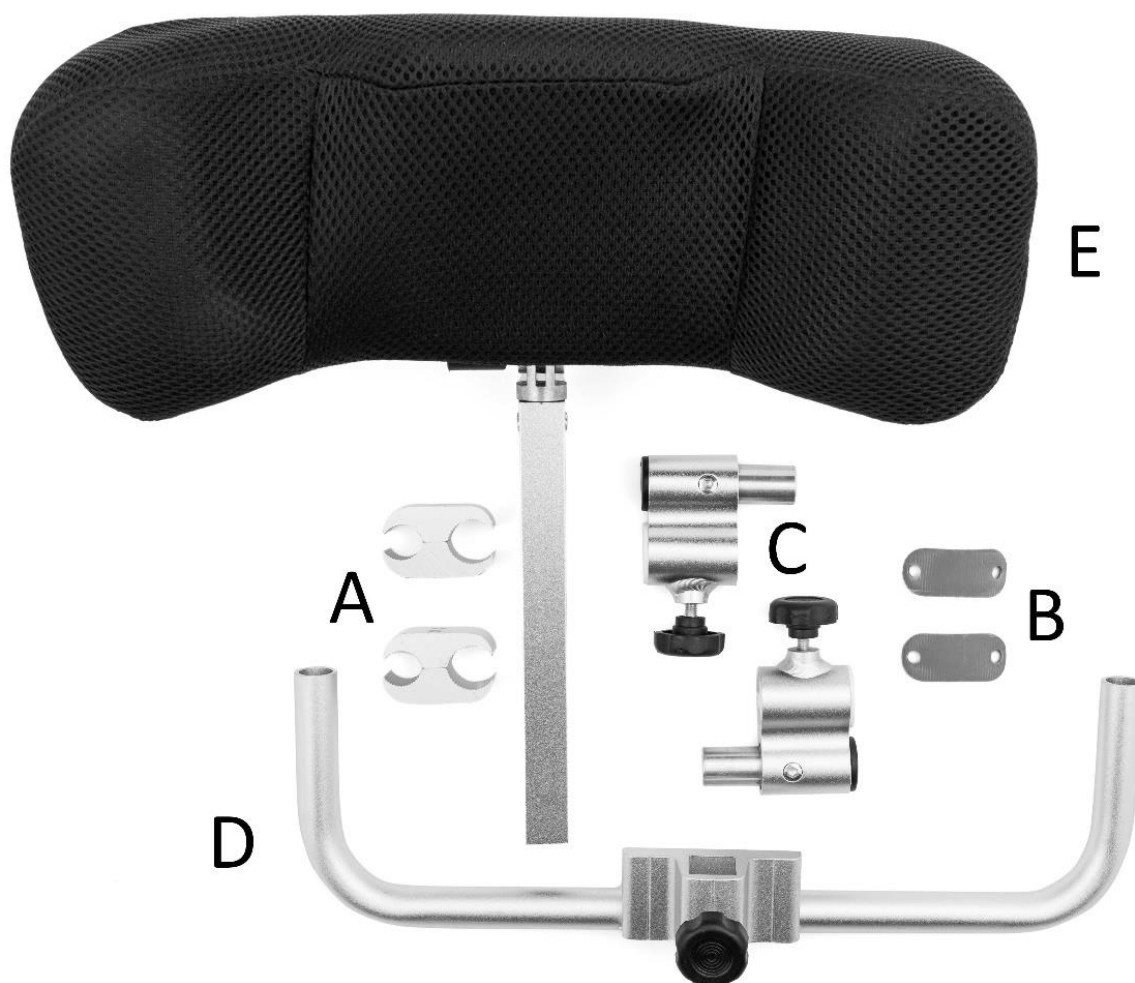

Rys. 1

2. Montaż

Rys. 2

- a) poluzować obie śruby montażowe w zacisku,
- b) w większym otworze zacisku umieścić podkładkę,
- c) do mniejszego otworu zacisku włożyć trzpień uchwyty,
- d) w podobny sposób przygotować drugi zacisk.



Rys. 2



Rys. 3



Rys. 4

Rys. 3 i 4

- a) przygotowany zacisk zamontować na pionowej części rurki uchwytu wózka,
- b) lekko dokręcić obie śruby montażowe zacisku,
- c) w podobny sposób zamontować drugi zacisk.

Rys. 5

- a) odkręcić pokrętła obu uchwytów w taki sposób aby w całości odsłonić otwory montażowe,
- b) do otworów włożyć ramę - poluzowane wcześniej śruby montażowe ułatwiają ustawienie ramy we właściwej pozycji,
- c) dokręcić wszystkie śruby montażowe w obu zaciskach.



Rys. 5

Rys. 6

- a) zamontować zagłówek w otworze montażowym ramy,
- b) dokręcić pokrętło ramy aby unieruchomić zagłówek,
- c) korzystając z trzech rączek regulacyjnych dostosować położenie zagłówka do potrzeb pacjenta.



Rys. 6

3. Uwagi i zalecenia

Timago International Group nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz za korzystanie niezgodne z przeznaczeniem.

4. Specyfikacja techniczna

Wymiary części materiałowej zagłówka	35 x 13 cm
Ilość stopni regulacji	3
Zakres regulacji w pionie	35 cm
Zakres regulacji w poziomie	15 cm
Waga zestawu	1,2 kg

5. Konserwacja

Należy systematycznie dokonywać konserwacji elementów zagłówka:

- Materiał zagłówka może być czyszczony zimną lub ciepłą wodą przy pomocy zwilżonej szmatki oraz bez użycia detergentów. Trudniejsze plamy należy czyścić przy użyciu gąbki.
- Elementy z metalu i tworzywa sztucznego należy czyścić zwilżoną szmatką, ewentualnie z wykorzystaniem środków do czyszczenia. Należy przy tym postępować zgodnie z instrukcją producenta oraz zasadami bezpieczeństwa przy wykorzystaniu detergentów.

6. Warunki przechowywania i transportu

Nie należy narażać wyrobu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wody i wilgoci.

7. Dane dotyczące gwarancji

Produkt objęty jest gwarancją, której warunki zostały opisane w otrzymanej przez Państwa karcie gwarancyjnej. Do celów gwarancyjnych należy zachować dowód zakupu (paragon lub fakturę).



Timago International Group
Spółka z o.o. i Spółka – Spółka komandytowa
ul. Karpacka 24/12
43-316 Bielsko-Biała, Polska

T.: +48 33 499 50 00
F.: +48 33 499 50 11
E.: info@timago.com

09/2022(I)