


Wysięgnik do łóżka DREAM-TIM

Wysięgnik z trójkątnym uchwytem o regulowanej długości

o pasa. Aby zamontować wysięgnik:

- Zablokuj wszystkie 4 kółka jezdne.
- Wybierz jedno z dwóch gniazd wysięgnika znajdujących się w narożnikach platformy materaca (od strony szczytu głowy).

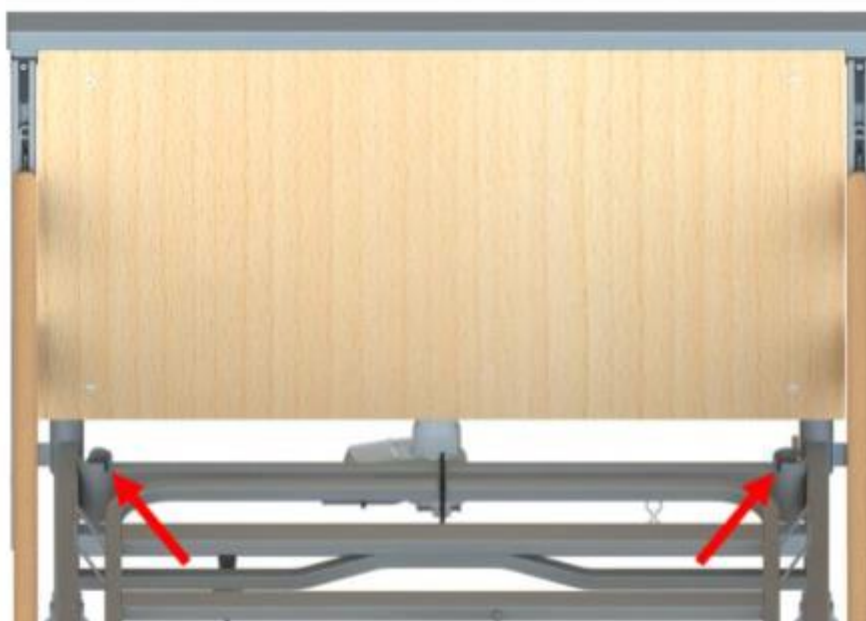

- Umieść wysięgnik w wybranym gnieździe wysięgnika. Uwaga! Upewnij się, że bolec pozycjonujący jest umieszczony w rowku pozycjonującym.
- Na wysięgniku umieść regulowany pas z uchwytem trójkątnym. Zwróć uwagę, aby pas uchwytu znalazł się pomiędzy bolcami pozycjonującymi.



- Montaż wysięgnika w miejscu do tego nie przeznaczonym stwarza ryzyko uszczerbku na zdrowiu lub wypadku.
- W celu zapewnienia użytkownikowi bezpieczeństwa w trakcie użytkowania wysięgnika, upewnij się, że wysięgnik został zamontowany poprawnie.



- Montaż wysięgnika **w miejscu do tego nie przeznaczonym** stwarza ryzyko uszczerbku na zdrowiu lub wypadku.
- W celu zapewnienia użytkownikowi bezpieczeństwa w trakcie użytkowania wysięgnika, upewnij się że wysięgnik został zamontowany poprawnie.